



PREMIUM ENGANGS MEDISINSK MUNNBIND


MYKE ØRESTRIKKER

EN 14683 TYPE IIR

EFFEKTIVITET $\geq 98\%$

BLACK

5
BK

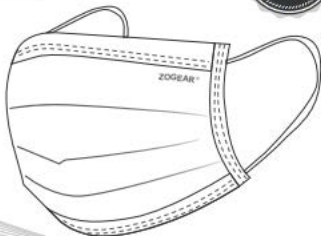

3 lags
beskyttelse

Brukerveiledning:

1



Rengjør hendene før du tar på munnbindet. Hold huden tørt. Agre munnbindet med den fargede siden ut og nesebøylen opp.

2



Fest ørestrikkene rundt ørene og juster nesebøylen. Trekk munnbindet ned og godt under haken.

3



Stram ørestrikkene godt rundt ørene. Se til at munnbindet sitter tett rundt hele ansiktet.

Produkt beskrivelse:

- EN 14683, medisinsk standard: 98% effektivitet
- 3 lags beskyttelse med høy kvalitet
- Latex fritt, mykt, luktfritt, ikke irriterende
- Lett å puste igjennom
- Regulert nesebøyle for bedre tilpasning
- Munnbindet er kun til engangsbruk

Bemerkning:

- Før du tar på deg munnbindet må du vaske hendene med alkoholbasert håndsprit eller såpe og vann.
- Unngå å berøre munnbindet mens du bruker det. Dersom du må det, må du rengjøre hendene med alkoholbasert håndsprit eller såpe og vann først.
- Bytt ut munnbindet med et nytt så snart det er fuktig eller etter 4 timer. Ikke bruk munnbindet på nytt.
- Slå fjerner du munnbindet: Fjern det ved hjelp av ørestrikkene (ikke berør fronten på munnbindet). Kast straks i en lukket søppelbeholder. Vask hendene med alkoholbasert håndsprit eller såpe og vann.
- Kontroller at emballasjen er forseglet og at utslapsdatoen ikke er overskredet før første gangs bruk.
- Oppbevares tørt og må ikke utsettes for direkte sollys.
- Hold munnbindet borte fra åpen ild.



Shanghai ZOGEAR Industries Co., Ltd.
Add: Room 303, Building 4, No. 408, Kangyi Road,
Putung New district, Shanghai, China

- 0086-21-68012608
- zogear@zogear.com
- www.zogear.com

EC Representative:

Luzia Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1 47877 Wülfrath, Germany
DIN02 DE0000047791
Tel: 0049-17156051750
E-mail: info@luzia.de



ZOGEAR®

生产商: 上海智固实业有限公司

生产地址: 安徽天长市经济开发区天康大道139号

生产许可证号: 皖食药监械生产许202000049号

产品注册证号: 皖械注准20202140113

执行标准: GB14683.2019; YY/T 0969-2013

LOT: D120JMD123

MFG: 20200923

EXP: 20220922

PRO01-3



6 931934 700750